



Harvest Surfactant™

Wetting agent for Pressable Ceramics and Gypsum Models
 Agent mouillant pour céramique pressurisée et modèles de gypse
 Befeuchtungsmittel für Formbare Keramik und Gips Modelle
 Agente humectante para cerámica prensada y modelos de yeso

Harvest Dental Products, LLC
 905 Columbia St.
 Brea, CA 92821 USA
 Tel: 1+714-674-7400
 Fax: 1+714-674-7402
 Email: hello@harvestdental.com
 Web: www.harvestdental.com

INSTRUCTIONS FOR USE – ENGLISH	INSTRUCTIONS D'UTILISATION, FRANÇAIS	GEBRAUCHSANWEISUNG- DEUTSCH	INSTRUCCIONES DE EMPLEO- ESPAÑOL
<p>INTENDED USE Harvest Surfactant used in dental and other professional industries to reduce formation of bubbles in gypsum models and investment molds</p>	<p>UTILISATION PRÉVUE Harvest Tensioactif utilisé dans les industries dentaires et autres industries professionnelles pour réduire la formation de bulles dans les modèles de gypse et les moules d'investissement</p>	<p>ANWENDUNGSZWECK Harvest Surfactant wird zur Reduzierung von Blasen in Gips Modellen und Einbettungsmulden im Zahnärztlichen und anderen Fachbereichen verwendet.</p>	<p>USO PREVISTO Harvest Surfactant es utilizado en odontología y otras industrias profesionales para reducir la formación de burbujas en los modelos de moldes de yeso y de fundición.</p>
<p>WORKING INSTRUCTIONS Direct Application - Spray, brush or dip the wax pattern or impression with Harvest Surfactant. - Cover all surfaces of the wax pattern prior to investing or the impression with a smooth, even coat. - Shake or blow away excess solution.</p>	<p>INSTRUCTIONS DE TRAVAIL Application Directe - Pulvériser, brosser ou tremper le motif de cire ou impression avec Harvest Surfactant. - Couvrir toutes les surfaces de la cire avant d'investir ou l'impression avec une couche lisse et uniforme. - Secouer ou souffler l'excès de solution.</p>	<p>Arbeitsanweisung Direkte Applikation - Sprühen, bürsten oder tauchen Sie das Wachsmuster oder Abdruck mit Harvest Surfactant - Decken Sie alle Oberflächen des Wachsmusters vor dem Einbetten ab oder überziehen Sie den Abdruck mit einer gleichmäßigen Schicht - Schütteln Sie überschüssige Lösung ab oder blasen diese weg.</p>	<p>INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Aplicación directa - Rocíe, cepille o sumerja el patrón de cera o la impresión con Harvest Surfactant. - Cubra todas las superficies del patrón de cera antes de fundir o imprimir con una capa lisa e uniforme. - Agite o sople el exceso de solución.</p>
<p>GUARANTEE Application recommendations are only a recommendation. We reserve the right to alter the products in terms of design or composition.</p>	<p>UNE GARANTIE Les recommandations d'application ne sont qu'une recommandation. Nous nous réservons le droit de modifier les produits en termes de conception ou de composition.</p>	<p>GEWÄHRLEISTUNG Anwendungs- Empfehlungen sind lediglich ein Vorschlag. Wir behalten uns Änderungen in Konstruktion und Zusammensetzung vor.</p>	<p>GARANTÍA Las recomendaciones de aplicación son solo recomendaciones. Nos reservamos el derecho de modificar los productos en términos de diseño o composición.</p>